

Optiben

TOALLITAS LIMPIEZA OCULAR

USO DUAL

- ▶ en **CALIENTE**
en caso de secreciones
u oclusión del lagrimal
- ▶ en **FRÍO**
en caso de inflamación
del ojo

►Indicaciones:

Optiben Toallitas Uso Dual está indicado para la higiene de los párpados y las cejas tanto en adultos como en niños, también en caso de secreciones causadas por alergias, inflamaciones y/o infecciones, por ejemplo blefaritis o blefaroconjuntivitis de diversos tipos. Su uso resulta especialmente adecuado en la fase pre y/o postoperatoria de las intervenciones de cirugía oftálmica.

Optiben Toallitas Uso Dual también se recomienda para la higiene cotidiana de la zona periocular en individuos propensos a la aparición de blefaritis y blefaroconjuntivitis de diversos tipos.

Gracias a su particular composición, también pueden utilizar Optiben Toallitas Uso Dual los portadores de lentes de contacto.

►Propiedades:

Todos los componentes de Optiben Toallitas Uso Dual resultan idóneos para lavar y calmar la zona periocular, puesto que se adaptan a su fisiología específica, particularmente delicada y sensible.

El producto presenta una gran compatibilidad física y química con la película lagrimal y, gracias a su pH equilibrado, no deja residuos y lleva a cabo un lavado preciso que elimina las secreciones, los posibles cuerpos extraños y el polvo, entre otros elementos.

►Composición:

Gasa de 100% algodón, impregnada de 2,8 ml de la solución Optiben Toallitas Uso Dual.

Solución con ácido hialurónico, extractos herbales, plata y aroma sin conservantes.

►Modo de empleo: Tras lavarse las manos de forma adecuada

En caliente



En caso de secreciones persistentes u oclusión del canalículo lagrimal, se recomienda calentar el sobre cerrado durante unos minutos en agua tibia (aprox. 40 °C) y utilizar la gasa como compresa caliente masajeando la zona delicadamente.

En frío



En caso de inflamación, se recomienda enfriar el sobre cerrado en un frigorífico durante varias horas y aplicar y mantener la gasa abierta sobre el ojo durante varios minutos como una compresa fría.

A temperatura ambiente



Abra el sobre y extraiga la gasa. Aplique la gasa pasándola delicadamente por la zona del párpado para conseguir un lavado adecuado y eliminar las secreciones oculares y los restos de cualquier otro tipo (smog, polvos, etc.).

► **Advertencias:**

La esterilidad del producto solo se garantiza si el sobre no presenta daños.

En caso de estados infecciosos no use la misma gasa para ambos ojos.

La gasa es de un solo uso. Su reutilización puede transmitir infecciones.

Conservar en un lugar fresco y seco.

Mantener lejos del alcance de los niños.

Uso externo.

En caso de irritación evidente o hipersensibilidad al producto, interrumpa el tratamiento.

Un solo uso.

Lea atentamente las instrucciones de uso.



Sede Legal

Via Fiume 25-20832 Desio (MB)-Italia

Sede operativa

Via G.Verdi 16/B-21020 Mornago (VA)-Italia

► **Distribuidor:**

LABORATORIOS CINFA S.A. Olaz-Chipi, 10. Polígono Industrial Areta. 31620 Huarte-Pamplona. Navarra. ESPAÑA.



STERILE R

PR021557/0417
Rev.01 del 10/04/2017

