

ThermaCare Parches Térmicos Terapéuticos (ADAPTABLE)

SE ADAPTA A TUS MOVIMIENTOS

Calor terapéutico que penetra en profundidad para un alivio prolongado del dolor.

- Eficaz contra el dolor
- Profunda relajación muscular

El parche térmico **ThermaCare** proporciona un alivio del dolor muscular y/o articular asociado a: cansancio, tensión muscular, esfuerzo excesivo, distensiones, esguinces y artritis.

Atención: Cada célula térmica contiene hierro (aproximadamente 2 gramos). Si el hierro es ingerido consulte inmediatamente a su médico. Si el hierro entra en contacto con la piel o los ojos, retire el parche, aclare con agua la zona afectada y consulte inmediatamente a su médico. Nunca caliente el producto en el microondas ni intente recalentarlo por otros medios, ya que el parche podría incendiarse.

Instrucciones de uso:

- Abra la bolsa protectora solamente si va a aplicar ThermaCare. ThermaCare puede tardar hasta 30 minutos en alcanzar la temperatura terapéutica deseada. Retire el papel dejando al descubierto la cara adhesiva. Coloque el parche sobre la zona a tratar. Presione firmemente el adhesivo.
- No utilizar en la cara, cabeza, pecho, zona interior del brazo o axila, dedos de la mano, ingles, parte inferior del abdomen, zona posterior de la rodilla, pies y dedos de los pies.

Precauciones:

- Los productos que emiten calor pueden causar quemaduras. Verifique periódicamente la piel mientras use ThermaCare. En caso de detectar signos de irritación o quemazón, retire inmediatamente el producto.
- Si notase demasiado caliente el parche, deje de utilizarlo o retírelo del contacto directo con la piel, colocándolo sobre una capa de ropa.
- El riesgo de sufrir quemaduras aumenta con la edad.
- **Si tiene 55 años o más, no utilice ThermaCare mientras duerme.**
- Para evitar el riesgo de sufrir quemaduras, retire el producto antes de someterse a una resonancia magnética.
- No lo utilice más de 8 horas en un periodo de 24 horas.

Consulte a su médico/farmacéutico antes del uso de este producto en caso de diabetes, problemas cardíacos o circulatorios, artritis reumatoide o si está embarazada.

Interrumpa el uso del producto y consulte con su médico:

- Si nota en la zona de aplicación de ThermaCare molestias, quemazón, hinchazón, exantema u otros cambios cutáneos persistentes en la piel.
- Si después de 7 días de uso el dolor persiste o se agrava.

No utilizar:

- **Si observa células térmicas con pérdida de contenido y/o el parche está dañado o rasgado.**
- Con cremas o pomadas analgésicas, otros parches o fuentes de calor adicional.
- Sobre piel agrietada o con heridas.
- Sobre zonas en las que haya aparecido hematoma o edema en las últimas 48h.
- Sobre zonas corporales en las que no se sienta el calor.
- En personas que no sean capaces de seguir todas las instrucciones de uso.
- En personas que no sean capaces de retirar por sí mismas el producto incluidos niños, lactantes y algunos ancianos.

NO UTILIZAR EN LA CARA, CABEZA, PECHO, ZONA INTERIOR DEL BRAZO O AXILA, DEDOS DE LA MANO, PARTE INFERIOR DEL ABDOMEN, INGLES, ZONA POSTERIOR DE LA RODILLA, PIES Y DEDOS DE LOS PIES.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Los parches **ThermaCare** son de un sólo uso.

Fabricante: Angelini Pharma Inc., 1231 Wyandotte Dr., Albany, Georgia, 31705, USA

Representante Autorizado en la UE: Angelini Pharma S.p.A. Viale Amelia, 70, 00181, Roma, Italy

Contacto en España: Angelini Pharma España S.L., C.Osi, 7, 08034, Barcelona, España

CE₁₆₃₉